

SpiroScout SP plus

Erweitern Sie Ihr EKG-Gerät mit Ultraschall-Spirometrie



SPIROSCOUT SP PLUS

Mit SpiroScout SP plus fügen Sie Spirometrie ganz einfach Ihrem EKG-Gerät hinzu:

- ❖ präzise Ultraschalltechnologie von GANSHORN
- ❖ kalibrationsfrei
- ❖ keine Aufwärmzeit und keine beweglichen Teile

SpiroScout SP plus und Ihr SCHILLER EKG-Gerät nutzen die gleiche Plattform für zwei verschiedene Anwendungen. So sind Sie in der Lage, Ihre Effizienz zu steigern. Profitieren Sie von den Vorteilen eines voll ausgestatteten EKG-Geräts und Spirometers und einer einfacheren Datenverwaltung, die dank der gleichen Datenorganisation möglich wird.

Das SpiroScout SP plus enthält einen Ultraschallsensor, der den Luftstrom in und aus den Lungen des Patienten misst. Dank der Ultraschalltechnologie gibt es keine beweglichen Teile mehr,

Sie müssen keine Siebe reinigen und auch keine Einwegartikel kalibrieren.

Die Durchflussmessung mit Ultraschall erfolgt unabhängig von Gaszusammensetzung, Luftdruck und Feuchtigkeit und eliminiert damit Fehler im Zusammenhang mit diesen Parametern. Die Ultraschallwellen können im Einweg-ScoutTube zwischen den Sensoren gesendet und empfangen werden.

Das Einweg-ScoutTube führt keine Messfunktionen aus und muss daher nicht kalibriert werden.

NACHHALTIGE EINWEG-VERWENDUNG

Um die Nachhaltigkeit seiner Produkte zu garantieren, leistet SCHILLER für die ScoutTubes und SpiroDef ScoutTubes-Filter einen Beitrag zum Klimaschutz.


myclimate.org/01-20-162037



EINZIGARTIGE VORTEILE DER ULTRASCHALLTECHNOLOGIE VON GANSHORN:

Vorteile der Ultraschalltechnologie

- ❖ Sensor nicht in Kontakt mit der Probe
- ❖ keine Verzerrung durch Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Kontamination
- ❖ kalibrationsfrei
- ❖ keine Reinigung der Sensoren/Filter nötig, wartungsfrei
- ❖ einfaches und günstiges Verbrauchsmaterial
- ❖ sehr hohe Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- ❖ keine Ausfallzeiten

Nachteile der herkömmlichen Technologie*

- ❖ Sensor immer in Kontakt mit der Probe
- ❖ sehr empfindlich auf Kontamination (Messfehler)
- ❖ regelmässige Kalibrierung nötig
- ❖ Reinigung nötig
- ❖ begrenzte Genauigkeit bei tiefen Flussraten
- ❖ wartungsbedingte Ausfallzeiten

*Turbine, Pneumotachograph, geheizter Draht



CARDIOVIT FT-2



CARDIOVIT CS-104




CARDIOVIT CS-104 Spiro



CARDIOVIT AT-102 G2



SPIROVIT SP-1 G2

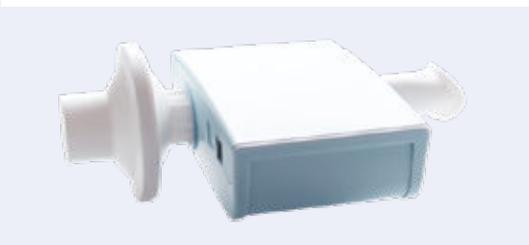

SCOUTTUBE

- ❖ hygienisches Einweg-Verbrauchsmaterial für einen umfassenden Kontaminationsschutz
- ❖ ovale Form für leckfreies Abschlüssen und optimale Positionierung der Zähne
- ❖ konische Form, die allen Patienten passt, unabhängig von der Patientenanatomie

SPIRODEF SCOUTTUBE-FILTER

- ❖ genaue, reproduzierbare Resultate ohne Lecks
- ❖ Schutz gegen Kreuzkontamination und zusätzlicher Schutz für Benutzer und Techniker





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai – 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
 100102 Beijing, China
 Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli – Istanbul
 Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 119049 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
 Bromborough, Wirral,
 Merseyside, CH62 3RJ
 Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

